

# Abastecimento do Aparelho com Nitrogênio Líquido



**Solar Importação**

# Abastecimento do Nitrogênio Líquido

## Modo de Abastecer I



1) - Com o pescador de nitrogênio líquido na posição vertical, posicione o bocal da garrafa do aparelho na borda do pescador.



2) - Com o bocal da garrafa do aparelho bem encaixado, suba lentamente a garrafa do aparelho e o pescador ao mesmo tempo.



3) - Suspenda o pescador de nitrogênio líquido e a garrafa do aparelho até a altura que o nitrogênio escorra totalmente.

# Abastecimento do Nitrogênio Líquido

## Modo de Abastecer II



1) - Com o pescador de nitrogênio líquido na posição vertical, apóie firmemente por baixo com um pano que isole a temperatura.



2) - Com o pescador de nitrogênio líquido seguro, posicione na borda do bocal da garrafa do aparelho e derrame lentamente.



3) - Incline o pescador de nitrogênio líquido na garrafa do aparelho até que o nitrogênio escorra totalmente.



# SOLAR IMPORTAÇÃO

Distribuidor e Assistência Técnica Autorizada

C.N.P.J. 73.536.724/0001-28

Tel: (11) 3699-2323 / (11) 4321-3872