

Abastecimento do Aparelho com Nitrogênio Líquido



Cry-Ac®do Brasil

Abastecimento do Nitrogênio Líquido

Modo de Abastecer I



1) - Com o pescador de nitrogênio líquido na posição vertical, posicione o bocal da garrafa do aparelho na borda do pescador.



2) - Com o bocal da garrafa do aparelho bem encaixado, suba lentamente a garrafa do aparelho e o pescador ao mesmo tempo.



3) - Suspenda o pescador de nitrogênio líquido e a garrafa do aparelho até a altura que o nitrogênio escorra totalmente.

Abastecimento do Nitrogênio Líquido

Modo de Abastecer II



1) - Com o pescador de nitrogênio líquido na posição vertical, apóie firmemente por baixo com um pano que isole a temperatura.



2) - Com o pescador de nitrogênio líquido seguro, posicione na borda do bocal da garrafa do aparelho e derrame lentamente.



3) - Incline o pescador de nitrogênio líquido na garrafa do aparelho até que o nitrogênio escorra totalmente.

Importado por



d o B r a s i l

Importador Exclusivo e Assistência Técnica Autorizada

C.N.P.J. 02.672.362/0001-54

Tel: (11) 3699-2323 / Fax: (11) 3722-2679

E-mail: cryac@cryac.com.br / Site: www.cryac.com.br